

PHARMASTERIL SPRAY 2.0

PHARMASTERIL SPRAY 2.0. è un Dispositivo Medico CE 0546 di classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla 2007/47/CEE.

PHARMASTERIL SPRAY 2.0. è una soluzione idroalcolica pronta all'uso con azione disinfettante per dispositivi medici non invasivi quali apparecchiature biomedicali e riuniti di studi dentistici.

L'efficacia di PHARMASTERIL SPRAY 2.0. si deve alla presenza di più principi attivi.

È attivo contro i batteri Gram-positivi e Gram-negativi, funghi, micobatteri e virus (compresi HIV-HBV-HCV).

APPLICAZIONI

PHARMASTERIL SPRAY 2.0. è un prodotto pronto all'uso specifico per la disinfezione di dispositivi medici non invasivi. Utilizzare solo su materiali compatibili con alcool. Per uso professionale. Si usa tale quale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Non diluire.

Spruzzare diffusamente sui dispositivi medici non invasivi o loro superfici da trattare.

Non necessita di risciacquo, se non dove necessario.

TEMPI DI APPLICAZIONE:

Attività battericida, virucida e fungicida: 5 minuti

Attività micobattericida: 60 minuti

CONFEZIONI

Codice interno:
R722

Imballo primario:
Flaconi da 1000 ml

Imballo secondario:
Scatola da 12 flaconi + 2 trigger

Barcode
8032584800723

ITF
18032584800720

Misura scatola (mm)
335 l x 253 p x 274 h

Composizione pallet
40 ct (4 piani x 10)

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene allergizzanti ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.

segue **SCHEDA TECNICA**

PHARMASTERIL SPRAY 2.0

COMPOSIZIONE

100,0 g di prodotto contengono:

Clorexidina digluconato 0,1 g; Benzalconio cloruro 0,1 g; Alcol etilico 45,0 g; Alcol isopropilico 15,0 g; coformulanti; acqua depurata q.b. a 100,0 g.

CARATTERISTICHE

Liquido incolore con profumo caratteristico.

ATTIVITÀ

PHARMASTERIL 2.0. è una soluzione pronta all'uso che svolge una rapida ed efficace azione disinfettante. È attivo contro i batteri Gram-positivi e Gram-negativi, funghi, micobatteri e virus.

Norma	Attività	Tempi di contatto
EN14476	Virucida (Adenovirus, HIV-HCV-HBV)	5 minuti
EN14348-EN14563	Micobattericida	60 minuti
EN13727-EN14561	Battericida	5 minuti
EN13624-EN14562	Fungicida	5 minuti

Test di compatibilità su alginati.

VALIDITA'

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITA'

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

AUTORIZZAZIONI

Dispositivo Medico CE 0546 di Classe IIa conforme alla Direttiva 93/42/CEE come emendata dalla Direttiva 2007/47/CEE.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI

Pharma Trade Company srl - via Torazza 115-121 20861 Brugherio MB
tel 039 2142186 fax 039 2872944 info@pharmatrade.it www.pharmatrade.it