

CARRELLO REX

REX TROLLEY

MANUALE D'USO – USER MANUAL

REF 27439

Distribuito da / distributed by:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy




INTRODUZIONE





Si consiglia di leggere attentamente il seguente manuale prima di utilizzare il presidio.

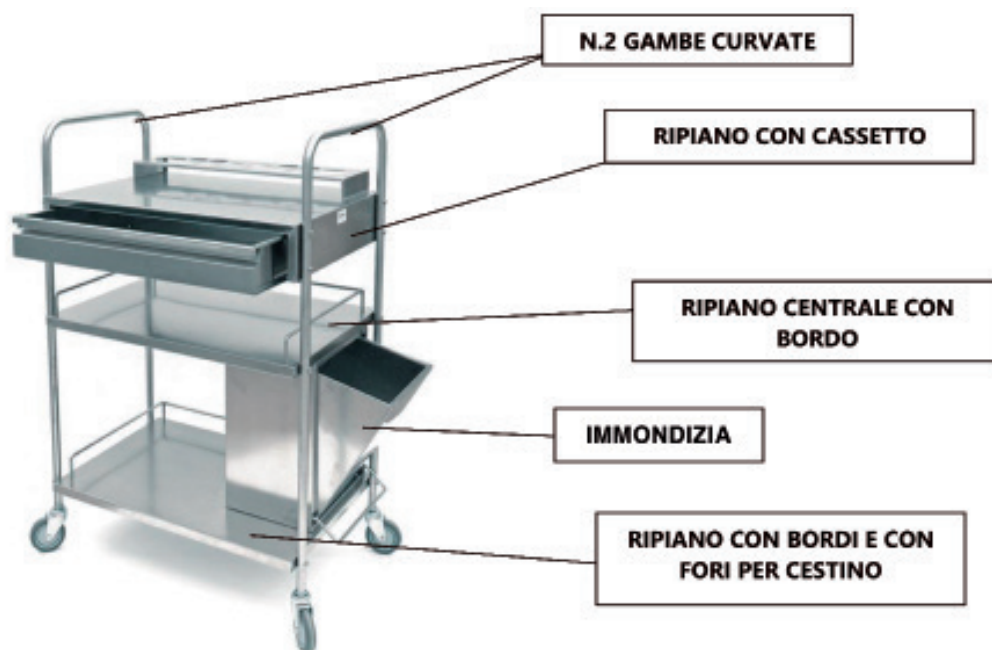DESCRIZIONE

Il presente articolo è un carrello di medicazione ad uso ospedaliero, interamente in acciaio inox a 3 ripiani dotato di cestino per i rifiuti e portabottiglie. Indicato per effettuare le medicazioni in ospedali, cliniche e ambulatori medici.









COMPONENTI:

N.2 gambe curvate	
N.2 ruote Ø 100 mm senza freno	
N.2 ruote Ø 100 mm con freno	
N.1 ripiano superiore con cassetto e portabottiglie	

N.1 ripiano centrale con bordi	
N.1 ripiano con bordi e con fori per aggancio immondizia	
N.1 Cestino per la immondizia	

KIT DI MONTAGGIO:

8 TBE 8x35 (per ripiano superiore con cassetto)	
8 Rosette M8 (per ripiano superiore con cassetto)	
4 TSPE 6x18 (per cestino immondizia)	
4 Dadi M6 (per cestino immondizia)	
4 Rosette M6 (per cestino immondizia)	
1 chiave m6m10 1 chiave a brugola da 4 1 chiave a brugola da 5 1 chiave a brugola da 8 (per ruote)	

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Preparare un piano d'appoggio abbastanza ampio sul quale lavorare.

Prendere una gamba e il ripiano superiore con cassetto e appoggiare sul piano di lavoro.



Fissare la gamba ad un lato del ripiano superiore tramite n.4 viti **TBE 8x35** in dotazione.



Svitare le viti che mantengono il ripiano centrale al traverso.


E riavvitare per fissare il ripiano centrale alla gamba.




Procedere nello stesso modo svitando le viti che mantengono l'ultimo ripiano al traverso e riavvitare per fissarlo alla gamba.



Un lato è completo, passare ad assemblare la seconda gamba seguendo gli stessi passaggi.

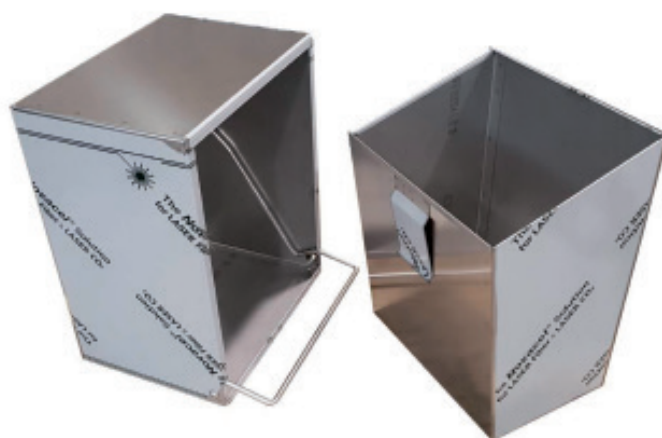

Schiacciando la leva a pedale inclinare all'indietro il cestino ed estrarre quest'ultimo.

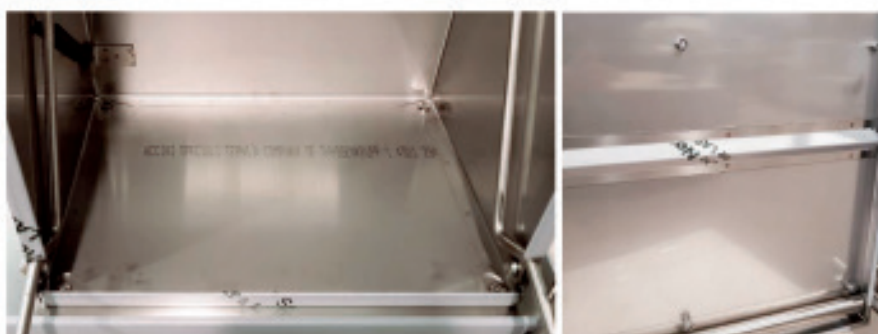

Inserire le n.4 viti TSPE 6x18 e sul fondo del ripiano tenere relativa rondella e dado per fissare il cestino al ripiano.



Inserire le ruote con freno frontalmente (lato cassetto) ed incastrarla una alla volta nel terminale del tubo della gamba.



Infine, prendere la brugola e avvitare fino a fissaggio ultimato.

DATI TECNICI:

Misure	Ingombro totale cm 83 x 51,5 x 119,5 h Cestino per immondizia capacità 26 L contenitore esterno: cm 33,3x25x43h contenitore interno: cm 25x30x41 pedale: cm 33x8 Scatola cm 114 x 54 x 39
Peso	33 kg (con scatola 36,7 kg)
Portata massima	15 kg/ripiano

AVVERTENZE D'USO

- Fissare bene le viti con la chiave a brugola in dotazione.
- Verificare che i dadi del bloccaggio siano ben stretti.
- Attenersi alle portate massime indicate nelle schede tecniche.
- Evitare il contatto diretto con ferite aperte.
- Non adatto all'uso in ambienti aperti.

MANUTENZIONE E PULIZIA

- Utilizzare solo ricambi originali.
- Controllare periodicamente tutti i punti di fissaggio.
- Per conservarlo al meglio, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata ai raggi solari; il contatto con ambienti salini; il deposito in ambienti molto umidi.
- Lavare le superfici in acciaio inox con acqua saponata ed usare disinfettanti appositi.
- Risciacquare con un panno bagnato ed asciugare con cura.
- Non versare sulle superfici detergenti a base di cloro o ammoniaca, sostanze grasse ed oleose.
- Non usare per la pulizia utensili contenenti ferro. Se necessaria la disinfezione usare solo prodotti idonei non corrosivi.
-

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.