



GIMA

DETERGENTE ENZIMATICO - 3 litri

Codice: 36618

Categoria: Disinfettanti ambiente, strumenti

Unità di vendita: 1 pz.

Quantitativi minimi: 1

Dispositivo: Dispositivo medico

Classe: I

NSIS: 2588281

CND: D0801

EAN13: 8009110026193



Descrizione: GERMOCID ENZIMATICO - 3 l

Detergente chiaro e liquido a base enzimatica adatto per la pulizia di strumenti medicali invasivi. Utile per un'efficace igienizzazione di strumenti chirurgici e odontoiatrici, vetro, plastica e oggetti metallici. Pratico: è sufficiente diluirlo in 1 litro di acqua tiepida, immergere gli strumenti per 10 minuti e risciacquare.
Etichetta/manuale in GB, IT.
Produzione italiana.

Caratteristiche tecniche: **COMPOSIZIONE CHIMICA:** 100 g contengono: enzimi proteolitici 0,5 g, agenti tensioattivi non ionici 10-15 g, coformulanti, acqua necessaria per 100 g