



Manopola in TNT politenata



CODICE PRODOTTO

NM-WSGL

DESCRIZIONE PRODOTTO

Il prodotto è composto da uno speciale TNT da 50 g/m2 accoppiato con una pellicola di polietilene da 20 g/m2 per renderlo impermeabile. Estremamente delicato al contatto con la pelle e con un elevato potere assorbente.

Le misure sono 22x16.5 cm.

DESTINAZIONE D'USO

Settore dentale, ospedaliero-medical, RSA, industria e pulizia.
Utilizzo: ambito ospedaliero o domiciliare.
Indicato per il lavaggio semplice e veloce di ogni parte del corpo.

CATEGORIA DI RISCHIO DPI

DPI di I categoria. Conformità al regolamento (UE) 2016/425.

Caratteristiche tecniche

CODICE EAN	MISURA	TAGLIA	PESO
8055719540431	22x16.5 cm	Unica	TNT (50 g/m2), PE (20 g/m2)

MATERIA PRIMA


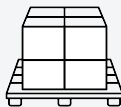
TNT + PE

AVVERTENZE

Attenzione: il prodotto è combustibile. La combustione può produrre fumi tossici: monossido di carbonio, ossido di carbonio. Mezzi estinguenti: acqua, polvere, CO2.

Conservare il prodotto nel suo imballaggio originale in luogo fresco e asciutto; Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole, all'ozono ed a fonti di calore; Effettuare sempre una prova preliminare nelle reali condizioni di utilizzo; Non utilizzare il prodotto in contatto con prodotti chimici o con prodotti irritanti e corrosivi; Indossare il prodotto con le mani asciutte e pulite; Prima di utilizzare il prodotto controllarne l'integrità; Il prodotto non necessita di schede di sicurezza.

DATI LOGISTICI

CONFEZIONAMENTO	Confezionamento primario	Confezionamento secondario	Pallettizzazione
	50 pezzi 	1000 pezzi (20 buste) 	40 Cartoni 
	Busta trasparente	Cartone ondulato	Pallet in legno 80x120x200 cm

ISTRUZIONI D'USO

Estrarre il prodotto dalla confezione e inserire la mano al suo interno.
Bagnare il prodotto con acqua.
Detergere delicatamente la cute. Asciugare senza risciacquare.

STOCCAGGIO

Immagazzinare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore. Non esporre a luce solare diretta, luce UV e lampade fluorescenti. Se il confezionamento è danneggiato o bagnato scartare il prodotto.

SMALTIMENTO

Il dispositivo, al termine del suo utilizzo, deve essere trattato secondo le vigenti normative in materia in funzione del campo di applicazione in cui è stato impiegato.

VALIDITÀ	5 anni dalla data di produzione
FABBRICANTE	MED CONSULTING srl - Via Revello 38M - SALUZZO - CN - ITALY
LUOGO DI PRODUZIONE	Paesi Extra U.E.
IMPORTATORE	MED CONSULTING srl - Via Revello 38M - SALUZZO - CN - ITALY



CE DPI

